



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Minőségi és mennyiségi összetétel:

Egy hüvelykúp tartalma: bázisos bizmut-gallát – 100 mg, növényi kollagén – 15 mg, kakukkfű kivonat (*Thymus vulgaris*) – 10 mg, kanadai aranygyökér kivonat (*Hydrastis canadensis*) – 10 mg, körömvirág kivonat (*Calendula officinalis*) – 10 mg, kurkuma kivonat (*Curcuma longa*) – 10 mg, hexilrezorcin – 2 mg, félszintetikus gliceridek, vízmentes lanolin, koloid szilícium-dioxid.

A készítmény külleme:

Homogén hüvelykúpok, sárga vagy sötétsárga színűek, oldatlan részecskék vagy légbuborékok nélkül. Minden doboz 2 buboréksomagolást tartalmaz, mindegyikben 5 hüvelykúp. Egy hüvelykúp súlya 2 g.

Javasolt felhasználók:

A Cerviron felnőtt nők számára ajánlott (beleértve a menopauzában lévő nőket is).

Mire használható:

A Cerviron a következők kezelésére szolgál:

- atrófiás, aerob, traumás és fertőzőes eredetű akut és krónikus vulvovaginitis,
- cervikális (méhnyak) eróziók,
- traumás eredetű hüvelyi vérzések,
- hüvelyi pH és a normál hüvelyflóra zavarai.

Nőgyógyászati műtétek utáni posztoperatív helyreállításra is használható, valamint antibiotikumokkal vagy gombaellenes készítményekkel végzett kezelés kiegészítéseként alkalmazható.

Javallatok:

A Cerviron egy orvostechnikai eszköz, amely atrófiás, aerob, traumás és fertőzőes eredetű akut és krónikus vulvovaginitis kezelésére szolgál, traumás vagy fertőzőes eredetű cervikális (méhnyak) eróziók és azok által okozott vérzések kezelésére, nőgyógyászati műtétek utáni posztoperatív helyreállításra, a pH és a normál hüvelyi flóra helyreállítására, valamint antibiotikumokkal vagy gombaellenes készítményekkel végzett kezelés kiegészítéseként alkalmazható.

A Cerviron a következő tünetek kezelésére javallott:

- hüvelyi viszketés,
- égő érzés a hüvely területén,
- kiütés,
- kellemetlen szagú hüvelyi folyás,
- diszuria (fájdalmas vizezés),
- diszpareunia (fájdalmas közösülés),
- a méhnyak eróziója által okozott hüvelyi vérzések.

A Cerviron önmagában vagy nőgyógyászati betegségek kezelésére szolgáló speciális gyógyszeres kezeléssel kombinálva is alkalmazható.

Ellenjavallatok:

Ne használja a Cerviront, ha túlérzékeny a termék bármely összetevőjére.

Terhesség és szoptatás:

A megfelelő klinikai adatok hiánya miatt a Cerviron alkalmazása terhes nők számára nem ajánlott. Ebben az esetben forduljon szakorvoshoz. A szoptatás alatt történő alkalmazásakor nincs szükség különösebb óvintézkedésekre.

A gépjárművezetésre és gépek kezelésére gyakorolt hatások

A készítmény egyetlen összetevője sem befolyásolja a gépjárművezetési vagy gépkezelési képességet.

Kölcsönhatások más készítményekkel:

Más készítményekkel való kölcsönhatása nem ismert, ezért javasoljuk, hogy beszéljen orvosával, mielőtt a Cerviron hüvelykúpot más hüvelyi használatra szánt orvostechnikai eszközzel vagy hüvelyi használatra szánt gyógyszerrel együtt alkalmazza.

Adagolás és alkalmazás:

A hüvelykúpot intravaginálisan kell alkalmazni, lehetőleg este lefekvés előtt vagy az orvos utasítása szerint. Válasszon le egy buborékot a buborékcsoomagolásról a perforált vonal mentén történő szakítással. Ezután nyissa ki a buborékot a két réteg lassú szétválasztásával ott, ahol nincsenek együtt lezárva. Nyomja ki a hüvelykúpot a másik végéről.

Célszerű a hüvelykúpot fekvő helyzetben bevezetni.

Helyezze be a hüvelykúpot a lehető legmélyebben a hüvelybe.

A hüvelykúpok alkalmazása a menstruáció utáni első napon kezdődik. Az alkalmazás időtartama 10 vagy 15 nap havonta, vagy az orvos utasításai szerint. A hatás a kezelés első hónapja után jelentkezhet.

A használat több hónapig is megismételhető, amíg a gyógyulás be nem következik, vagy az elért kedvező hatások stabilizálódnak és fennmaradnak.

Különleges figyelmeztetések és óvintézkedések az alkalmazáshoz:

- A termék összetétele miatt általában nincs szükség óvintézkedésekre.
- Alaposan mossa meg a kezét és az intim területet a hüvelykúp alkalmazása előtt.
- Ne használja a hüvelykúpot, amennyiben a buborék sérült vagy a külső felületén anyaggyomok vannak.
- Ne használjon olyan hüvelykúpokat, amelyek egyenetlen megjelenésűek vagy amelyeken kicsapódott részecskék vannak.
- Ne vágja el a hüvelykúpokat.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A termék hüvelyi használatra szolgál. Ne nyelje le.
- Szembe ne kerüljön.
- Ne használja a terméket a csomagoláson és a buborékcsoomagoláson feltüntetett lejárati idő után.
- Az orvostechnikai eszköz használata befolyásolhatja az óvszerek és a latex membránok hatásosságát.
- Tájékoztassa orvosát, ha terhességet tervez.
- Tájékoztassa a gyártót vagy az illetékes hatóságokat a Cerviron orvostechnikai eszköz használatával kapcsolatos bármely súlyos eseményről!

Mellékhatások:

A helyi hatású készítmények hosszú távú alkalmazása helyi irritációt és érzékenységet okozhat. Ha mellékhatások jelentkeznek, hagyja abba a kezelést, és forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

Az orvostechnikai eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos váratlan eseményt jelenteni kell a gyártónak és a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Túladagolás:

Túladagolás esetei nem ismertek. A benne levő anyagok nem szívódnak fel szisztémásan, az alkalmazást követően legfeljebb 24 órán belül természetes úton távoznak.

Lejárat, tárolás és ártalmatlanítás:


Tárolja 2-25°C között az eredeti csomagolásban, hogy megvédje a közvetlen napfénytől. A csomagoláson feltüntetett lejárati idő a gyártó által megadott feltételek mellett tárolt termékre vonatkozik. Az orvostechnikai eszközt ne dobja a szennyvizbe vagy a háztartási hulladékkal! Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy a szükségtelenné vált orvostechnikai eszközöket miként semmisítse meg.

Gyártó:

Perfect Care Manufacturing S.R.L.

no. 82 Complexului street,
085200 Mihailesti city,
Giurgiu county, Romania.
<https://www.perfectcare.ro>
contact@perfectcare.ro

Approved on 03 February 2025
by Krisztina Szijártó dr.

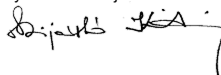

2.kiadás 7. átdolgozás

Kiadás dátuma: 2024.10.15.



1282